



10 אוגוסט 2017

לקוחות נכבדים

הנדון: ערכת כרטיסי רגישות חדשה לשמרים AST-YS08

חברת אילקס שמחה לבשר על השקת ערכת כרטיסי רגישות חדשה לשמרים - AST-YS08.

ערכה זו מחליפה את ערכה AST YS07 (מק"ט 5-414967).

בערכה החדשה התרחב טווח מדידת ה MIC עבור שלושה תכשירים אנטיביוטיים:

AST YS07 (5-414967)			AST YS08 (5-420739)		
Antimicrobial	MIC range	FDA Indications for Use	Antimicrobial	MIC range	FDA Indications for Use
Amphotericin B	0.25-16		Amphotericin B	0.25-16	
Caspofungin	0.25-4	C. albicans, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. guilliermondii, C. glabrata	Caspofungin	0.125-8	N/A**
Fluconazole	1 - 64	Candida spp.	Fluconazole	0.5 - 64	C. dubliniensis, C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. guilliermondii, C. lusitaniae
Flucytosine	1 - 64		Flucytosine	1 - 64	C. albicans, C. dubliniensis, C. glabrata, C. guilliermondii, C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. tropicalis
Micafungin	0.06-4	N/A**	Micafungin	0.06-8	N/A**
Voriconazole	0.12-8	C. albicans, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. lusitaniae, C. guilliermondii	Voriconazole	0.12-8	C. albicans, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. lusitaniae, C. guilliermondii

הערכה החדשה זמינה במלאי של אילקס.

תהליך המעבר של הערכות מהערכה הישנה לחדשה יתבצע בהדרגתיות ובתקשורת מול הלקוחות.

אין שינוי במחיר עבור הערכה החדשה.

להלן פרטי הערכה:

כמות בדיקות	מק"ט	תיאור
20	5-420739	AST-YS08

במבחן התוצאה - אילקס



בהזדמנות זו מזכיר כי לפני הכנסת כרטיס רגישות חדש למכשיר ה VITEK חשוב לערוך תהליך היכרות בין הכרטיס החדש לבין המערכת (המכשיר ותחנת ה SCS). להלן שלבי התהליך:

בתוכנת המכשיר :

1. כניסה ל Maintain AST Card Definitions (ממוקם בארגז הכלים).
2. הוספת כרטיס חדש.
3. סריקת רשימת הברקודים המופיעים בצד האחורי של ה Package Insert.
4. בדיקה כי רשימת האנטיביוטיקות המופיעה מתאימה לרשימה ב Package Insert (✓)
5. שמירה.

בתחנת ה SCS:

1. לחיצה על כפתור F6.
2. סריקת שני הברקודים הראשונים המופיעים ברשימה ב Package Insert.
3. אישור.

נשמח לעמוד לשירותיכם בכל מידע נוסף.

בברכה,
מיה גרינולד
מנהלת מוצר מיקרוביולוגיה
אילקס מדיקל בע"מ

