


VIDAS[®] LMX

Détection et confirmation de *Listeria monocytogenes*

Protocole général

Protocole certifié AFNOR Validation selon l'ISO 16140, N° BIO 12/27-02/10

1 Détection avec VIDAS LMX

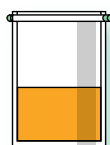

225 ml
de bouillon LMX
+ 0,5 ml de supplément LMX

26-30 h / 37°C ± 1°C

250 µl



VIDAS Heat & Go / 5 ± 1 min*

Retirer la barrette et laisser refroidir 10 min



VIDAS LMX
Résultats 80 min

Test \ominus < 0.05
Absence
de *Listeria monocytogenes*

Test \oplus \geq 0.05

CONFIRMATION

ou

Méthode de
référence


Milieu
chromogène

2 Confirmation

Bouillon LMX

Isolement sur milieu chromogène
Ottaviani Agostini Agar

Couleur
bleue
avec
halo

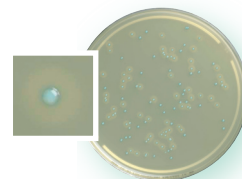

24 h / 37°C ± 1°C

Gamme *Listeria monocytogenes*

42647	Bouillon LMX	6 x 225 ml
42648	Supplément LMX	6 x 6 ml
30123	VIDAS LMX	60 tests
43641	chromID™ Ottaviani Agosti	20 boîtes
43649	chromID™ Ottaviani Agosti	100 boîtes


*Pour la majorité des échantillons, pour plus de détails se reporter à la fiche technique des produits.

VIDAS LMO2


Detection and confirmation of *Listeria monocytogenes*

Protocol validated by AFNOR n° BIO - 12/11-03/04 for all food products and environment

1 detection using VIDAS LMO2

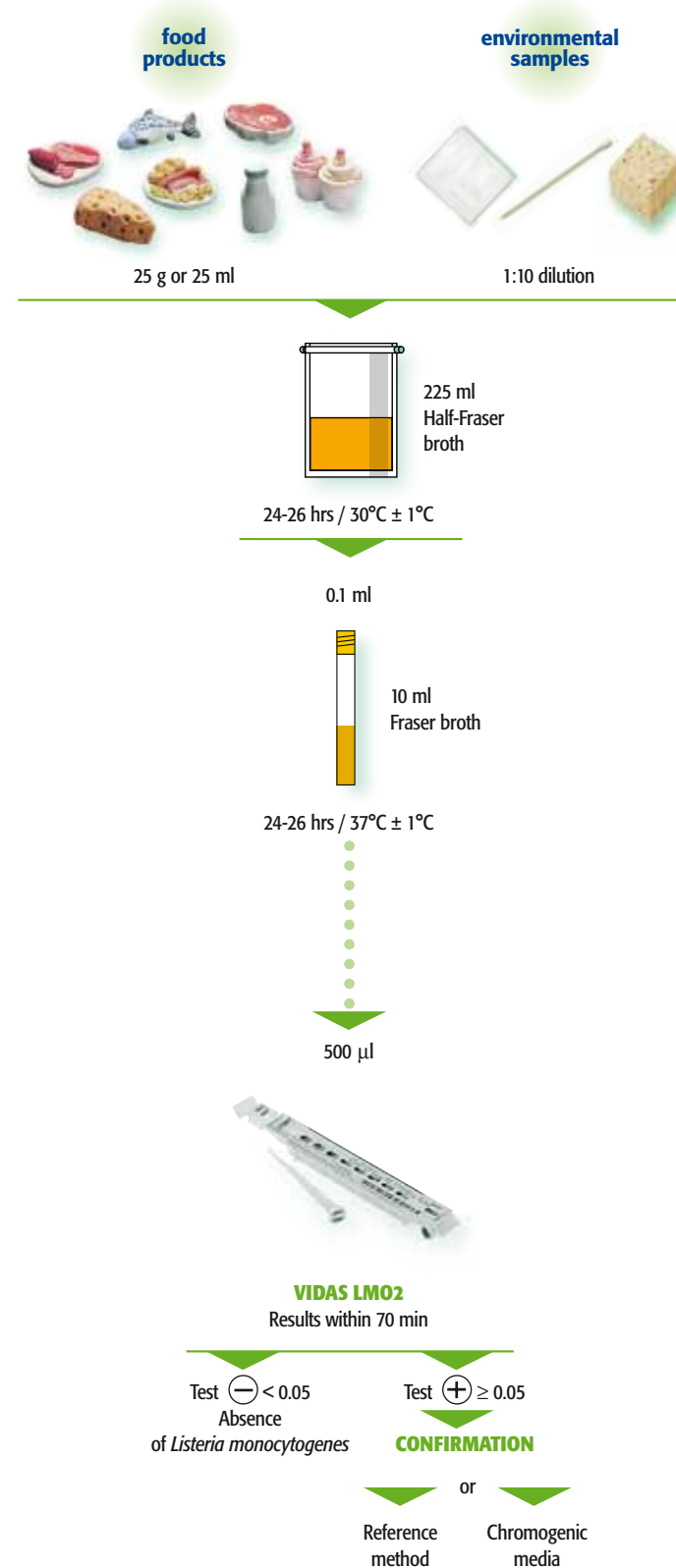

2 confirmation

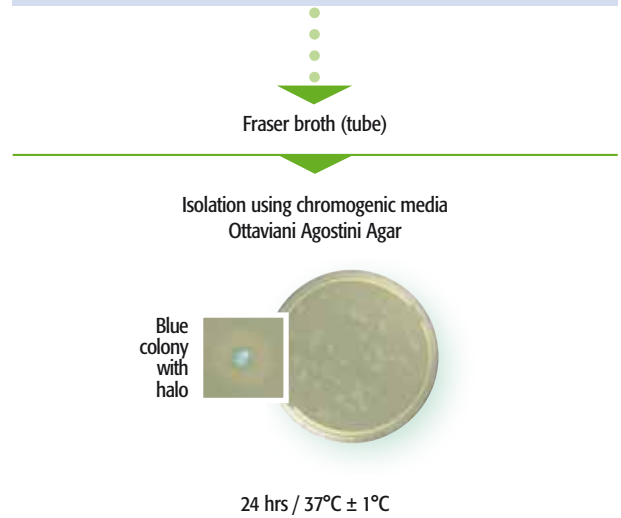

Listeria monocytogenes range

42615	Half-Fraser broth (Bottle 300 ml)	4 x 225 ml
42048	Half-Fraser broth (Bottle 250 ml)	6 x 225 ml
42627	Half-Fraser broth	3 x 3 l
42727	Half-Fraser broth (Minibags)	10 x 225 ml
42112	Half-Fraser broth	20 tubes 10 ml
42072	Fraser broth	20 tubes 10 ml
43641	Ottaviani Agosti Agar	20 plates
30704	VIDAS <i>L. monocytogenes</i> II (LMO2)	60 tests

For further details, consult the product package insert.

bioMérieux S.A.
69280 Marcy l'Etoile
France
Tel. (33) 04 78 87 20 00
Fax (33) 04 78 87 20 90

www.biomerieux.com
www.biomerieux-industry.com

